

Handleiding Alere Afinion™ 2 CRP sneltest

Alere Afinion™ 2 Analysator



- Schakel de Analysator aan en voer indien gewenst de operator-ID in.
- Tijdens de analyse kan een informatiecode verschijnen op het scherm. Frequent voorkomende informatiecodes worden achteraan in deze handleiding vermeld. De volledige lijst met informatiecodes kan u raadplegen in de gebruikershandleiding van de Alere Afinion™ 2-analysator.

Test cartridge



- Bewaar de test kit:
 - Gekoeld (2-8°C): tot de uiterste gebruiksdatum.
 - Op kamertemperatuur (15-25°C): niet langer dan 4 weken.
- Indien u de test kit gekoeld bewaart: laat de ongeopende folieverpakking voor gebruik ongeveer 15 minuten op tafel liggen. (De testcartridge moet vóór gebruik een temperatuur tussen 15 en 30°C hebben bereikt.)
- Gebruik de testcartridge binnen de 10 minuten na het openen van de folieverpakking.


Patiëntmonster




- Gebruik een druppel capillair bloed (direct van vinger).
- Capillaire monsters kunnen niet worden bewaard. Gooi de cartridge weg na gebruik.




Open de folieverpakking.
Gebruik de cartridge binnen de
10 minuten.

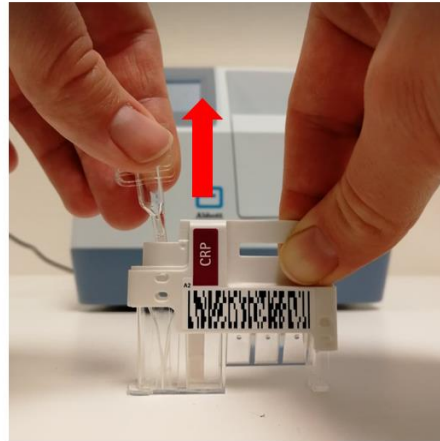


Trek het capillair recht omhoog
uit de testcartridge

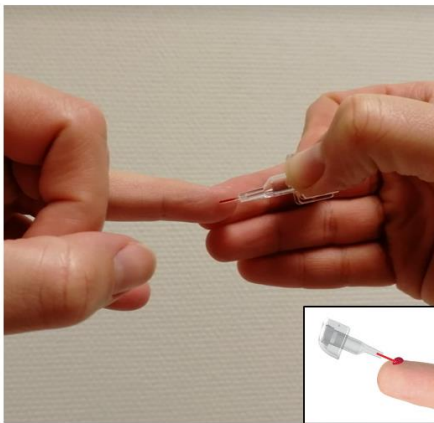


Vul het capillair volledig met
patiëntmonster.

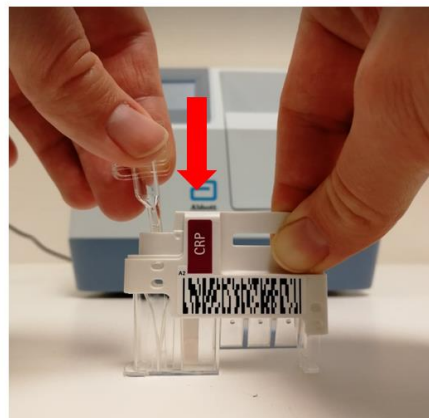

Plaats het capillair onmiddellijk
terug. De analyse moet binnen
1 minuut starten.

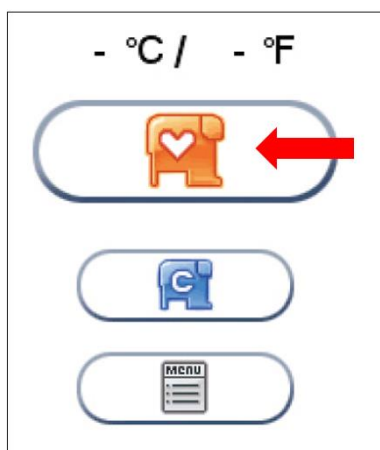


Raak  aan om een
patiëntmonster te analyseren.



Plaats de cartridge in de
analysator met de
streepjescode naar links.




Sluit het deksel handmatig.

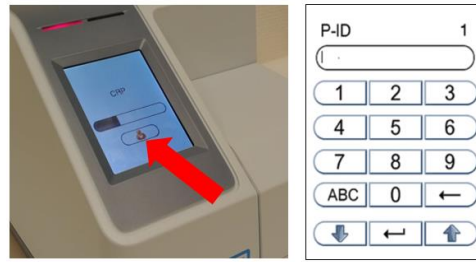


De CRP waarde wordt berekend.

Raak  aan en voer de patiënt-ID in.

Raak  aan om te bevestigen




Na 4 minuten kan u het resultaat aflezen op het scherm.

Raak  aan om te bevestigen. Het deksel opent automatisch.



Verwijder de cartridge


Patiëntgegevens herbekijken of exporteren

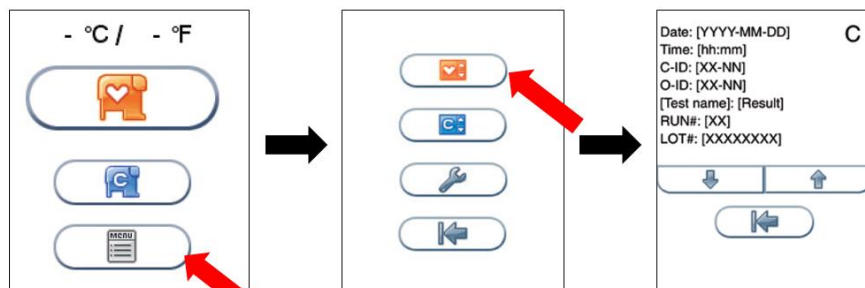


Opstartmenu

Hoofdmenu

Laatste resultaat wordt weergegeven.

 Resultaat afdrukken.

 Resultaat exporteren naar USB-stick.

Frequent voorkomende informatiecodes:

Code	Oorzaak	Te ondernemen actie
201	Onvoldoende monstervolume: - Leeg capillair - Luchtbel in capillair - Capillair niet voldoende gevuld	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
202	Te veel monstermateriaal op de buitenkant van het monsternameapparaat	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Zorg dat alleen het topje van het capillair contact maakt met het monster
204	Gecoaguleerd monster, hemolyse van bloedmonster of slechte monsterkwaliteit	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. De tijd vanaf het vullen van het capillair tot het analyseren van de testcartridge dient zo kort mogelijk te zijn. Als het probleem zich blijft voordoen, herstart de analysator en voer controles uit.
209	Vervaldatum van testcartridge verstreken of de datum van de analysator is incorrect ingesteld.	Controleer de vervaldatum op het folie of het doosje. Herhaal de test met een nieuw monster en een testcartridge uit een ander lot. Controleer of de datum van de analysator correct is ingesteld.
213 214	Fout testcartridge of analysator	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge
304	Temperatuur analysator is te laag.	Wacht tot de analysator is opgewarmd. Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het aanbevolen bereik ligt. (15-32°C) Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.

U kan de volledige lijst met informatiecodes raadplegen in de Alere Afinion™ 2 systeemhandleiding.